

Adper Prompt L-Pop - адгезивная система (41925)



Цена:

По запросу

Упаковка:

1 шт.

Под заказ

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Самопротравливающий стоматологический адгезив, 40 блистеров (4,8 мл).

Обычная упаковка:
40 блистеров (4,8 мл)

Назначение:

- Адгезив для обычных светоотверждаемых композитов и компомеров
- Адгезив для герметиков
- Десенсибилизация открытых корневых участков

Преимущества:

- Протравка, прайминг и бондинг за один этап
- Меньше этапов при применении: меньше вероятность ошибок – соответственно, большая безопасность
- Нет необходимости в отдельном протравливании
- Повышенная вязкость для лучшего увлажнения полости
- Прекрасная адгезия к тканям зуба
- Более 3 лет клинического применения Adper Prompt L-Pop
- Очень низкая степень постоперативной чувствительности
- Высокая гигиеничность
- Контроль активации: возможность визуального определения правильности активации системы L-Pop

Инструкция по использованию:

- Активируйте блистер
- Интенсивно и тщательно втирайте Adper Prompt L-Pop в отпрепарированную поверхность твердых тканей зуба в течение 15 сек
- Просушите воздухом
- Нанесите второй слой
- Снова просушите воздухом
- Полимеризуйте в течение 10 сек