

Бианол



Цена:	Объем:	Упаковка:
По запросу	Да	1 шт.

☒ Под заказ

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Дезинфицирующее средство для текущей дезинфекции.

Бианол

Нет режима дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО.

Проверенное временем надежное средство:

- для дезинфекции, включая дезинфекцию высокого уровня, и стерилизации изделий медицинского назначения;
- для дезинфекции в ветеринарии при всех видах инфекций, включая споры сибирской язвы;
- не вызывает коррозии металлов и не повреждает термолабильные материалы.

Состав

Глутаровый альдегид 4%, глиоксаль 2,8%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 4%, неионогенное поверхностно-активное вещество, краситель.

Консистенция, свойства

Прозрачная жидкость от синего до зеленовато-синего цвета со слабым запахом, хорошо смешивается с водой. pH средства 3,6 - 4,8.

Микробиология

Обладает вирулицидными, бактерицидными (включая туберкулоцидные), фунгицидными (кандидозы, дерматофитии) и спороцидными свойствами.

Токсичность

Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии паров.

Назначение

В лечебно-профилактических учреждениях различного профиля:

- для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;
- для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
- для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним;
- для дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей приборов, оборудования, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, в том числе при проведении генеральных уборок.

В ветеринарии:

- для профилактической и вынужденной дезинфекции различных объектов ветнадзора при инфекционных заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии, возбудители которых относятся к 1 и 2 группам; при экзотических инфекционных заболеваниях невыясненной этиологии, сибирской язве и других споровых инфекциях.

Срок годности

Срок годности один год в невскрытой упаковке производителя при комнатной температуре, рабочих растворов - 10 суток при условии их хранения в закрытых емкостях в темном прохладном месте.

Условия хранения

Средство следует хранить при температуре плюс 5°C до плюс 25 °C, не

допуская попадания солнечных лучей.

Особенности и примечания

Рабочие растворы можно применять многократно в течение срока годности, если их вид не изменился.