

Бонацид-салфетка



Цена:

По запросу

Фасовка:

Упаковка:

Да **Пакет**

☒ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Салфетки пропитанные дезинфицирующим средством Бонацид для экспресс-дезинфекции.

"Бонацид-салфетка" - это готовое к применению дезсредство для экспресс-дезинфекции небольших по площади и труднодоступных поверхностей.

"Бонацид-салфетка" представляет собой готовые к использованию салфетки размером 180x135 мм (± 5 мм) однократного применения из крепированной бумаги, упакованные поштучно в герметичные пакеты из многослойного материала.

Индивидуальная упаковка каждой салфетки придает дополнительное преимущество в части их использования - удобно брать с собой.

Салфетки обладают высокой прочностью: при использовании не рвутся, не сбиваются в комок, не оставляют остаточной пленки на обработанной поверхности; совместимы с материалами медицинского оборудования (кроме подверженных воздействию спиртов).

"Бонацид-салфетка" применяется:

- населением в быту и в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей или предметов
- обработки обуви с целью профилактики грибковых заболеваний;

- для обработки предметов ухода за больными, игрушек из непористых (гладких) материалов (пластик, стекло, металл и др.);
- для обработки телефонных аппаратов, мониторов, клавиатур и другой офисной техники

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, птичьего, свиного гриппа и другие типы вируса гриппа, возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон;
Пролонгированным антимикробным действием в течение 3 часов.

Пропиточный состав "Бонацид-салфетка":
комплекс четвертичных аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид) - 0,1%;
изопропиловый спирт - 60%;