

Детартрин Z



Цена:

1 400 руб.

Упаковка:

1 шт.

Под заказ 1-2 недели

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Детартрин Z, Detartine Z- паста для удаления зубного камня с истолченным цирконом

Детартрин Z, Detartine Z- паста для удаления зубного камня с истолченным цирконом

Состав:

Циркон истолченный, кремнезем, растительные эссенции, наполнитель.

Свойства:

ДЕТАРТРИН Z выпускается в виде пасты розового цвета с приятным запахом. ДЕТАРТРИН Z обладает абразивным действием, что особенно применимо в зубоврачебной практике, и объясняется оно особой структурой содержащихся в ней зернышек циркона. В микроскоп эти зерна видны в виде плоских скребков, поверхность которых разделена острыми перегородками большой прочности. Когда этот порошок растирается на неровной поверхности, именно эти острые перегородки устраняют шероховатости.

Благодаря этому свойству истолченного циркона ДЕТАРТРИН Z снимает зубной камень, не повреждая эмали. Эссенции, входящие в состав Detartine Z дают ощущение свежести, что нравится пациентам.

Кроме того, эссенции обладают легким бальзамическим действием, поэтому легко снимается раздражение, которое может вызвать операция по снятию зубного камня на слабых деснах.

Показания

Снятие зубного камня. Detartrine Z показан курильщикам, а также больным литиазом, который вызывает отложения зубного камня.

Кроме того, ДЕТАРТРИН Z может применяться для полировки пломбированных зубов, что придает им блеск.

Способ применения:

Шпателем набрать нужное количество пасты Detartrine Z и распределить на циркулярную щетку.