

ЭКОМИН



Цена:

По запросу

Под заказ 1-2 недели

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Универсальное дезинфицирующее средство.

Описание: дезинфицирующее средство

Производство: Россия

Назначение: средство предназначено для:

дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды лабораторной и столовой, в т.ч. однократного использования, белья, уборочного материала, резиновых коврик, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, медицинских отходов из текстильных материалов, изделий медицинского назначения однократного применения перед их утилизацией, санитарного транспорта, проведения генеральных уборок при инфекциях бактериальной (включая туберкулез и ООИ), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических и детских учреждениях, инфекционных очагах, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бани, бассейны, спорткомплексы, парикмахерские, общественные туалеты и т.п.), предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, потребительских рынках, учреждениях социального обеспечения;

дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры) с целью профилактики бактериальных инфекций, в том числе

легионеллеза, в лечебно-профилактических учреждениях, магазинах, театрах, офисах и т.п.;

дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой ручным и механизированным в установках ультразвуковой очистки способами, изделий медицинского назначения из различных материалов, включая стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся, слюноотсасывающие установки), стоматологические материалы (оттиски из альгината и силикона, зубопротезные заготовки, артикуляторы), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, в лечебно-профилактических учреждениях; стерилизации изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты и материалы, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, в лечебно-профилактических учреждениях;

дезинфекции высокого уровня эндоскопов в лечебно-профилактических учреждениях.

Состав дезинфицирующего средства “Экомин”: содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) 53,75% комплекса четвертичных аммонийных соединений (48,75% алкилдиметилбензиламмония хлорида и 5,00% алкилдиметилэтилбензиламмония хлорида) и функциональные добавки

Консистенция, свойства дезинфицирующего средства “Экомин”: средство представляет собой жидкость желтого или синего цвета со слабым специфическим запахом или запахом отдушки.

Фасовка дезинфицирующего средства “Экомин”: 1 и 5 л.

Микробиология дезинфицирующего средства “Экомин”: средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций (ООИ) – чумы, холеры, туляремии, легионеллеза, сибирской язвы), вирусов (включая вирусы гепатита В, ВИЧ-инфекции, полиомиелита), патогенных грибов, в т.ч. возбудителей кандидоза и трихофитии, а также спорцидными и моющими свойствами.

Норма расхода для готовых растворов: дезинфекцию поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы), резиновых ковров проводят способом протирания ветошью, смоченной в растворе средства, или способом орошения из гид-ропульта, автомакса, распылителя типа “Квазар” и др. Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Норма расхода раствора средства при протирании – 100 мл/кв.м. поверхности, при орошении – 300 мл/кв.м. (гидропульт, автомакс), 150 мл/кв. м. (распылитель типа “Квазар”) на одну обработку. После проведения дезинфекции способом орошения проводят влажную уборку. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят при полном их отключении с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции. Профилактическую дезинфекцию секций центральных и бытовых кондиционеров

и общеобменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха проводят 1 раз в квартал. Дезинфекцию воздуховодов проводят по эпидпоказаниям. Дезинфекции подвергают секции центральных и бытовых кондиционеров, системы общеобменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха, фильтры, радиаторные решетки и накопители конденсата, воздухоприемник, воздухораспределители, насадки. Перед дезинфекцией проводят мойку мыльно-содовым раствором. Дезинфекцию указанных объектов проводят 0,1% раствором средства при времени дезинфекционной выдержки 60 мин. способом орошения (норма расхода 150 мл/м² при использовании распылителя типа “Квазар” или 300 мл/м² при использовании гидропульта, автомакса) или протирания (норма расхода 100 мл/м²).

Токсичность дезинфицирующего средства “Экомин”: по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз.

Применение дезинфицирующего средства “Экомин”: дезинфекцию проводят способами протирания, орошения и погружения

Срок хранения дезинфицирующего средства “Экомин”: 5 лет, рабочих растворов составляет 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях в темном месте. Средство после размораживания сохраняет свои свойства.

Условия хранения дезинфицирующего средства “Экомин”: хранят средство на складе в упаковке предприятия-изготовителя. Температура хранения от минус 40С до плюс 35С. Не допускается хранить средство совместно с лекарственными препаратами.