

Эндометазон набор (14г+10мл)



Цена:

По запросу

Упаковка:

1 шт.

Под заказ

Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Постоянный пломбировочный материал для заполнения корневых каналов.

Эндометазон набор N - (14г+10мл)

Постоянный пломбировочный материал для заполнения корневых каналов

Состав:

ПОРОШОК

Дексаметазон 0,01 г

Гидрокортизон ацетат 1,00 г

Тимол иодированный 25,00 г

Параформальдегид 2,20 г

Рентгеноконтрастный эксципиент 100,00 г

ЖИДКОСТЬ

Эвгенол 91,0мл

Масло перечной мяты 4,5 мл

Анисовое масло 4,5 мл

ЭНДОМЕТАЗОН СЛОНОВАЯ КОСТЬ является неабсорбирующим, неокрашивающим зуб материалом для пломбирования корневых каналов на основе окиси цинка-эвгенола с добавлением различных компонентов :

- Тимола иодированного и сульфата бария для увеличения рентгеноконтрастности и предотвращения усадки.

- Параформальдегид для предупреждения возможного бактериального

заражения

- Кортикостероиды для снижения болезненных ощущений часто наблюдаемых, когда для пломбирования корневых каналов используются пасты, содержащие окись цинка и эвгенол.

Показания

Пломбирование корневых каналов, либо одной пастой, либо с использованием штифта.

Рекомендуемая дозировка

Доза порошка на один корневой канал составляет в среднем 0,100 г -0,150г. Порошок используется в форме пасты, полученной путем смешивания, как это описано ниже.

Свойства:

- Не раздражает периапикальные ткани•
- Не рассасывается в корневом канале•
- Оказывает противовоспалительное и антисептическое действие в течение нескольких часов после заполнения корневого канала•
- Рентгеноконтрастен•
- В случае выведения небольших количеств пасты в периапикальную область происходит постепенное рассасывание•

Условия применения:

- Тщательная изоляция зуба•
- Тщательное высушивание корневого канала•
- Приготовление пасты в соотношении 5 частей порошка на 1 часть жидкости, смешивание в течение 30 секунд•
- Внесение пасты в канал при помощи каналонаполнителя•
- Применение в сочетании с гуттаперчевыми штифтами•

Предупреждения:

- Заполнять пастой только полностью подготовленный корневой канал
- Возможна кратковременная болевая чувствительность при выведении пасты заапикально
- Возможны аллергические реакции на компоненты пасты
- Возможна сенсibilизация при контакте препарата с кожей
- Приготовление пасты следует проводить в перчатках
- Остатки пасты со стенок зуба необходимо тщательно удалять (используйте для этого препарат «Гидрол»)

Внимание! Как и другие препараты, применяемые для пломбирования корневых каналов, получаемая после замешивания ЭНДОМЕТАЗОНА СЛОНОВАЯ КОСТЬ паста, содержит терапевтические агенты известные своим потенциальным нейротоксическим действием. Поэтому, в связи с нейротоксичностью, в частности, параформальдегида, паста должна находиться строго в пределах

корневого канала и не выходить за верхушку корня. Неправильное использование инструмента может способствовать выходу пасты за верхушку, что может вызвать аллергическую реакцию у чувствительных пациентов.

Использование пасты должно сопровождаться правильной подготовкой и обработкой корневого канала.

Предостережение

Закрывать колпачок на флаконе сразу же после применения порошка. Хранить при температуре 25 С.

Упаковка

Флакон 14 г порошка

(Существует упаковка; включающая три флакона по 14 г)

- Пузырек 10 мл жидкости.

Хранение в сухом месте при температуре ниже 25°С.