

Эндосольв Е



Цена:

По запросу

Упаковка:

1 шт.

☒ Под заказ

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Препарат для распломбировки каналов, запломбированных пастой на основе эвгенатов.

Endosolv E (Эндосольв Е)- препарат для распломбировки каналов, запломбированных пастой на основе эвгенатов.

Свойства:

-Эндосольв размягчающе действует на временные пломбы типа эвгенатов.

-Не вызывает повышенного слюноотделения при контакте со слизистой.

Способ применения:

Метод, рекомендованный для одного посещения:

- 1.Обработать механическим путем камеру и вход в каналы.
2. Ввести каплю Endosolv E в камеру и каналы, сначала зондом, потом очистить эндодонтическими инструментами, окуная до операции кончик инструментов в Endosolv.
3. Вытащить инструмент из канала и тщательно протереть.
4. Повторять операцию до тех пор, пока не будет достигнут апекс.

Метод, рекомендованный для двух посещений:

1. Обработать механическим путем камеру и вход в каналы.
2. Поместить в полость ватный тампон, пропитанный Endosolv E.
3. Закрыть временной пломбой.

4. Можно вновь открыть канал на следующий день или несколько дней спустя. Паста размягчается и распломбирование механическим путем не представляет трудности.

Рекомендации:

Зуб, обработанный ЭНДОСОЛЬВом, должен быть тщательно высушен перед новым пломбированием эвгенатом, смолой или акрилом.

Форма поставки:

флакон с жидкостью "Эндосольв" 13 мл.