

FUJI IX (Фуджи 9) GC цвет А3



Цена:

По запросу

Упаковка:

1 шт.

☒ Под заказ 3-5 дней

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Рентгеноконтрастный стеклоиономерный цемент для реставрирования боковых зубов.

ПОКАЗАНИЯ.

1. Пломбирование полостей I и II классов в молочных зубах.
2. Пломбирование полостей I и II классов в постоянных зубах в областях, не несущих значительной жевательной нагрузки.
3. Полупостоянный реставрационный материал и база реставрации в случае сэндвич-техники в полостях I и II классов в областях с сильной жевательной нагрузкой.
4. Пломбирование полостей V класса и цемента корня.
5. Восстановление культи зуба под коронку.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

1. Прямое перекрытие пульпы.
2. В редких случаях материал может вызвать чувствительность у некоторых пациентов. В случае возникновении таких реакций, прекратите применение материала и обратитесь к врачу.

Соотношение порошок/жидкость

3,6 г-1,0 г

Время замешивания

25-30 сек.

Рабочее время

2 мин.

Чистое время затвердевания

2 мин. 20 сек.

Условия тестирования: температура ($23\pm 1^{\circ}\text{C}$). Относительная влажность ($50\pm 10\%$). ISO 9917:1991 (E)

1. ДОЗИРОВКА ПОРОШКА И ЖИДКОСТИ.

а) Стандартное соотношение порошок/жидкость составляет 3,6г - 1,0г. (Одна полная ложечка порошка и одна капля жидкости).

б) Для точной дозировки порошка слегка постучите бутылочкой о ладонь. Не трясите и не переворачивайте.

в) Держите бутылочку с жидкостью строго вертикально, слегка надавливая.

г) Плотнo закрывайте бутылочки немедленно после использования.

2. ЗАМЕШИВАНИЕ.

Поместите дозированные порошок и жидкость на блок для замешивания.

Используя пластиковый шпатель, разделите порошок на две равные части.

Замешивайте одну половину порошка со всей жидкостью в течение 10 секунд.

Добавьте вторую порцию порошка и тщательно замешивайте весь материал еще 15-20 секунд.

3. ТЕХНИКА РЕСТАВРИРОВАНИЯ.

а) Отпрепарируйте полость, используя стандартную технику. Обширной макромеханической ретенции не требуется. Для перекрытия пульпы используйте материал на основе гидроксида кальция.

б) С помощью ватного шарика или аппликатора нанесите на связываемые поверхности GC Cavity Conditioner (на 10 секунд) или GC Dentin Conditioner (на 20 секунд)

в) Тщательно промойте водой.

г) Подсушите, удаляя влагу сухим ватным шариком или слегка обдувая струей воздуха. НЕ ПЕРЕСУШИВАЙТЕ. Наилучшие результаты достигаются, когда подготовленная поверхность выглядит влажной (блестит).

д) Замешайте необходимое количество Fuji IX GP. Рабочее время при $t\ 23^{\circ}\text{C}$

составляет 2 мин от начала замешивания. Более высокая температура сокращает рабочее время.

е) Внесите замешанный цемент в полость, пользуясь специальными канюлями или другим подходящим инструментом.

ж) Следите, чтобы в толще материала не оказалось пузырьков воздуха.

з) Произведите предварительное оконтуривание, при необходимости используйте матрицу. Немедленно нанесите на поверхность пломбы GC Fuji Varnish (обдувается воздухом) или Fuji Coat LC (светоотверждается).

4. ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА.

а) Финишную обработку по стандартной методике с водяным охлаждением можно начинать через 6 минут от начала замешивания.

б) Перед уходом пациента нанесите слой Fuji Varnish или Fuji Coat LC на пломбу.

в) Попросите пациента воздержаться от жевания на этот зуб в течение одного часа.

ХРАНЕНИЕ.

Хранить при 14-25°C.

(Срок хранения: 3 года от даты производства).

ЦВЕТ: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Расцветка по шкале Vita®, является зарегистрированной торговой маркой Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Германия.

РАСФАСОВКА.

1. Упаковка типа 1-1:15 г порошка, 8 г (6.4 мл) жидкости, мерная ложечка для порошка, блок для замешивания, пластиковый шпатель.

2. Бутылочка 15 г порошка с мерной ложечкой.

3. Бутылочка 8 г (6.4 мл) жидкости.

ВНИМАНИЕ.

1. В случае контакта материала с тканями полости рта или кожей немедленно удалите материал салфеткой или ватой, смоченной в спирте. Промойте водой.

2. В случае попадания материала в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

3. Не смешивайте порошок или жидкость Fuji IX GP с какими-либо компонентами других стеклоиономерных цементов.