

Объемная межпальцевая перегородка С 0717b



Цена:

По запросу

☒ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Перегородка выполнена из специального материала - силикона.

Перегородка применяется для лечения таких проблем, как молоткообразная деформация пальцев, Hallux valgus, натоптыши, намины, мозоли.

Дополнительно перегородка может использоваться в реабилитационных периодах после некоторых травм и операций.

Перегородка выполнена из специального материала - силикона.

Перегородка может использоваться даже в местах повреждений мягких тканей стопы.

Перегородка надевается на второй палец стопы и оказывает защитное действие на первый и второй пальцы от образования натоптышей, мозолей и наминов, от повторной травматизации.

Перегородка обеспечивает отведение первого пальца стопы и препятствует дальнейшей деформации 1-ого плюснефалангового сустава.

Перегородка уменьшает избыточное локальное давление на проблемные участки.

Перед использованием перегородку необходимо сначала обработать тальком.

Перегородка надевается на второй палец, перегородкой направляют в сторону большого пальца.

По времени ношения перегородка не имеет никаких ограничений.

Возможные размеры: S, M, L