

Сайдекс



Цена:

По запросу

Объем:

Да



Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Для дезинфекции и стерилизации жестких и гибких эндоскопов и инструменты к ним.

Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним: инструменты, используемые в стоматологии, микрохирургии), а также для стерилизации указанных изделий медицинского назначения (далее именуемых изделиями).

Свойства: бактерицидное (в том числе туберкулоцидными), вирулицидное (в том числе в отношении возбудителей парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции), фунгицидное и спороцидное.

Состав:

- жидкий компонент — 2% водный раствор глutarового альдегида
- порошкообразный компонент-щелочной агент
- ингибитор коррозии
- краситель

Способ применения:

Для приготовления раствора в емкость, содержащую жидкий компонент,

высыпают (избегая потерь) из прилагаемого к емкости пластмассового пенала порошкообразный активатор. Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится способом погружения. Разъемные изделия помещают в средство в разобранном виде.

Время выдержки:

- при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной этиологии — 15 мин;
- при кандидозах — 30 мин;
- при туберкулезе и дерматофитиях — 90 мин.

При проведении стерилизации все манипуляции проводят асептических условиях.

Время выдержки при температуре 21-1С составляет:

- изделий из металлов — 4 часа;
- изделий, в конструкцию которых входят другие, в том числе полимерные материалы — 10 часов.

Срок годности: 2 года.

Форма поставки: канистры 5 л и пластмассовые пеналы с порошкообразным компонентом к каждой емкости.

Производитель: "Джонсон энд Джонсон", США.