

Трость для ходьбы FS921



Цена:

950 руб.

Под заказ

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Трость четырехопорная обеспечивает надежную поддержку при ходьбе.

Трость четырехопорная обеспечивает надежную поддержку при ходьбе, рекомендуется для больных после перенесенного инсульта, а также пожилым людям.

Тростью можно пользоваться при ходьбе на улице или в домашних условиях.

Трость телескопическая изготовлена из легкого, прочного и устойчивого к коррозии алюминиевого сплава.

Ручка анатомической формы выполнена из прочного не скользящего пластика.

Регулируется по высоте при помощи надежного кнопочного фиксатора.

Широкое квадратное основание с четырьмя опорами.

Опорные насадки резиновые, прочные, не скользящие, сменные.

Конструкция обеспечивает комфорт и устойчивость.

Регулировка высоты через 2,5 см

Подбор размера:

Высота рукоятки под кисть должна быть такой, чтобы локтевой сустав находился в положении сгибания под углом 10-15 градусов.

Также важно правильно рассчитать размер ручки трости с учетом силы захвата ее рукой. Правильные размеры трости важны для обеспечения эффективного и безопасного передвижения.

При правильном использовании трости ее следует держать в руке, противоположно пораженной конечности: рука и нога передвигаются одновременно.

Уход за изделием :

Влажная обработка мыльными растворами без применения абразивных чистящих средств.

Размеры основания: 210x310x75 мм

Высота трости, мм 715 - 940 ($\pm 10\%$)

Вес нетто, гр 870 ($\pm 10\%$)

Максимальная нагрузка 100 кг

Регулировка высоты через: 2,5 см

Ступенчатых регулировок по высоте: 10