


# Трость для ходьбы YU821

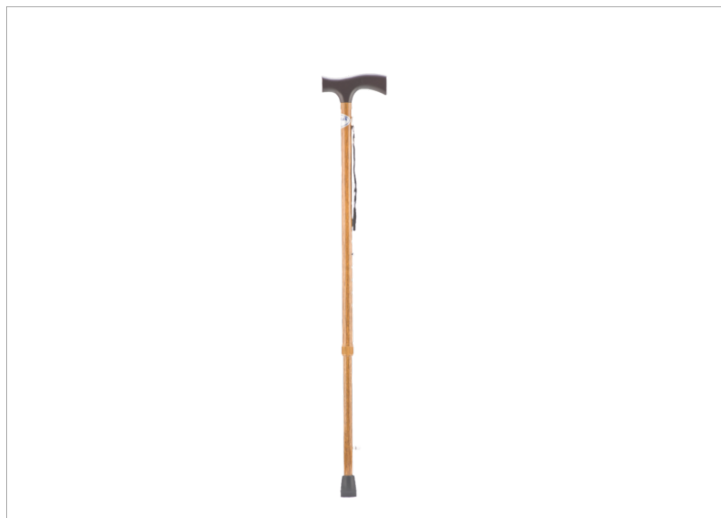

Цена:

По запросу

Цвет:

Да

Упаковка:

**1 шт.**

Под заказ

Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

## Описание

Трость для ходьбы с устройством против скольжения.

Трость для ходьбы с устройством против скольжения

Трости изготовлены из легкого, прочного и устойчивого к коррозии алюминиевого сплава. Т-образная ручка выполнена из прочного не скользящего пластика или дерева.

Опорные насадки резиновые, прочные, не скользящие, сменные.

Высота трости регулируется надежным кнопочным фиксатором.

Выдерживает нагрузку до 100 кг. Конструкция обеспечивает комфорт и устойчивость.

Минимальная высота: 725 мм

Максимальная высота: 935 мм

Регулировка высоты через: 2,5 см

Ступенчатых регулировок по высоте: 9

Вес: 390 гр

Высота рукоятки под кисть должна быть такой, чтобы локтевой сустав находился в положении сгибания под углом 10-15 градусов.

Также важно правильно рассчитать размер ручки трости с учетом силы захвата ее рукой. Правильные размеры трости важны для обеспечения эффективного и безопасного передвижения.

При правильном использовании трости ее следует держать в руке, противоположно пораженной конечности: рука и нога передвигаются одновременно.

Влажная обработка мыльными растворами без применения абразивных чистящих средств.