

ВИНАР-5 класс



Цена:

По запросу

Производитель: Название производителя

Описание

Индикаторы контроля переменных стерилизации: температура, время, выдержки и наличие водяного пара.

Индикаторы ВИНАР-6 класс предназначены для контроля переменных стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в паровых стерилизаторах, соответствующих ГОСТ Р 51935-2002 (EN 285) и малых паровых стерилизаторов, соответствующих EN 13060-2011.

Индикаторы 6 класса особенно необходимы при контроле стерилизации материалов и изделий медицинского назначения на неновом оборудовании, при использовании инструментария во время обширных операций, в частности, в трансплантологии, при операциях у иммунонекомпетентных больных, в онкологических и ожоговых отделениях, у больных СПИДом и в других случаях, когда требуются абсолютные гарантии качества стерилизации с уровнем обеспечения стерильности $\geq 10^{-6}$. 500 штук.

Характеристики продукта:

- относятся к классу 6 (имитирующие индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий;
- индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;

- чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному сине-фиолетовому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения, хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- гарантийный срок годности – 36 месяцев.

Регистрационные удостоверения ФСР 2010/09571, ФСР 2010/09573, ФСР 2010/09574, ФСР 2010/09575, ФСР 2010/09576 от 19.03.2013 г. Срок действия: не ограничен.

Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ28.Н01399. Срок действия до 31.05.2014 г.

Применяются в следующих стерилизационных циклах:

Наименование индикатора	Контрольные значения (температура °С /время, мин/давление пара, МПа)
ВИНАР-134/18	134+3/18+2